



Scheda tecnica

Lady-Comp basic

1



Descrizione:

LADY-COMP basic è tra i dispositivi Lady-Comp del 2015 quello base. E' un Dispositivo Medico per il controllo computerizzato del ciclo che indica alla donna i **giorni sicuramente infertili** e quelli **potenzialmente fertili**.

La sicurezza contraccettiva di metodo dei giorni indicati come "infertili" (verdi) è del 99,3%, comprovata da test clinici indipendenti (non sponsorizzati dal produttore tedesco) con un indice Pearl dello 0,7, anche con cicli irregolari.*

L'utilizzo dell'apparecchio NON richiede acquisti di stick o altro.

Utilizzo:

- ◇ Semplice: la donna, una volta al giorno, misura in modo sublinguale, con l'apposito sensore, la temperatura basale e immette, quando presente, il dato mestruale.
- ◇ Senza effetti collaterali.

Caratteristiche di Lady-Comp basic:

- ◇ Il plusvalore di Lady-Comp basic è il suo programma, sviluppato tenendo conto dei fondamenti medico scientifici di oltre 1 milione di cicli.
- ◇ Per garantire una sicurezza del 99,3%, pari a quella dei contraccettivi ormonali, il calcolo dell'inizio della finestra fertile del ciclo viene fatto sia tenendo presente la capacità fecondativa degli spermatozoi, che può arrivare fino a 120 ore (=5 giorni), sia l'oscillazione in giorni dell'ovulazione della donna.
- ◇ Per la determinazione del giorno di ovulazione e della fase post-ovulatoria viene utilizzata la temperatura basale rilevata con l'apposito termistore, che garantisce una precisione di valore al centesimo di °C.
- ◇ Il programma memorizza i dati della donna, calcola i valori medi delle temperature delle diverse fasi del ciclo, compie una serie di elaborazioni biomatematiche e di comparazione tra i dati rilevati e quelli memorizzati, riconosce e scarta automaticamente singoli dati non attendibili (ad es. per febbre). Il "Sistema Neuronale Intelligente" del software fa sì che LadyComp basic si adatti ai mutamenti ormonali che vi sono con il passare degli anni nel ciclo della donna.
- ◇ Da questo complesso sistema di calcoli deriva un'indicazione di fertilità giornaliera della donna (infertile o potenzialmente fertile) valida per 24 ore.
- ◇ Possibilità di utilizzo del dispositivo dal menarca alla menopausa.
- ◇ **Lady-Comp basic**, grazie alla sua versatilità, è perfetto e adatto a **qualsiasi donna in ogni età fertile che:**
 1. desidera oggi esclusivamente un metodo per evitare una gravidanza in modo naturale e sicuro, e non vuole precludersi, per un domani, la possibilità di avere un apparecchio più completo anche per il controllo della sua fertilità, richiedendo l'upgrade a Lady-Comp.
 2. Per chi invece desidera più informazioni intorno al proprio ciclo può in qualsiasi momento chiedere un upgrade a Lady-Comp.
 3. E chi infine vuole ampliare la propria famiglia, e non riesce subito, ha la possibilità di trasformare il proprio LadyComp basic in Lady-Comp baby, un vero laboratorio di informazioni.



Scheda tecnica

Lady-Comp basic

2



Indicazioni di Lady-Comp basic:

- ◇ **fertilità**
 - ◇ verde = infertile (affidabilità contraccettiva del 99,3%)
 - ◇ rosso = potenzialmente fertile
 - ◇ giallo = fase di apprendimento, misurazioni mancanti o squilibrio ormonale
- ◇ **prognosi**
 - ◇ di fertilità per i 6 giorni successivi.
 - ◇ della comparsa delle mestruazioni.
- ◇ **Altre indicazioni sul display:**
 - ◇ Dati elaborati negli ultimi 120 giorni
 - ◇ Probabile gravidanza dopo 15 giorni
 - ◇ Sicura gravidanza dopo 18 giorni dall'avvenuto concepimento.

Altre funzioni di Lady-Comp basic:

- ◇ Immissione dell'Indice di Massa Corporea BMI
- ◇ Impostazione dispositivo °C o °F.
- ◇ Upgrade ai modelli più completi = sia Lady-Comp che Lady-Comp baby
- ◇ Lettura dati su PC tramite cavo USB
- ◇ Stampa dati (PDF) con il proprio PC

- Funzionamento con una batteria ricaricabile (del tipo 2xAAA).
- Memoria dati: fissa 20 anni, temporanea 120 giorni
- Dimensioni cm 9 - peso 130 gr.
- Display a colori, cristalli liquidi.
- Utilizzo senza costi aggiuntivi mensili.

Garanzia: 2 anni

Prezzo al pubblico: € 445,00 IVA inclusa

* La sicurezza di metodo di Lady-Comp basic risulta essere del 99,3% quando il metodo è usato secondo le istruzioni e come unico metodo contraccettivo.
L'apparecchio non offre alcuna protezione dalle infezioni trasmesse per via sessuale o dall'HIV.

pag. 2 di 2