


# Scheda tecnica

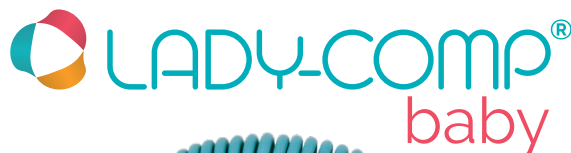


## Descrizione:

**Lady-Comp baby** è l'indicatore di fertilità computerizzato per eccellenza. E' utilizzabile da qualsiasi donna in età fertile, anche con cicli irregolari, sia come **metodo per la pianificazione mirata** di una gravidanza che per il **controllo dell'ovulazione** e della **fase luteinica del ciclo**, nonché come metodo per la **contraccezione tecnologica**, senza effetti collaterali.

La sicurezza contraccettiva di metodo di LadyComp baby, dei giorni indicati come "infertili" (verdi) è del 99,3%, comprovata da test clinici indipendenti (non sponsorizzati dal produttore tedesco) con un indice Pearl dello 0,7 \* anche con cicli irregolari.

Lady-Comp baby si è dimostrato essere un grande **aiuto per la procreazione**, anche in caso di **ridotta fertilità sia femminile che maschile**.

L'utilizzo dell'apparecchio NON richiede acquisti di stick o altro.

## Utilizzo:

**Semplice:** la donna, una volta al giorno, misura in modo sublinguale, con l'apposito sensore, la temperatura basale e immette, quando presente, il dato mestruale.

**Senza effetti collaterali.**

## Caratteristiche di Lady-Comp baby:

Il programma di LadyComp baby è stato sviluppato dopo un'analisi di oltre un milione di cicli tenendo conto dei fondamenti medico scientifici sul ciclo mestruale.

Per garantire una sicurezza del 99,3%, pari a quella dei contraccettivi ormonali, il calcolo dell'inizio della finestra fertile del ciclo viene fatto sia tenendo presente la capacità fecondativa degli spermatozoi, che può arrivare fino a 120 ore (=5 giorni), sia l'oscillazione in giorni dell'ovulazione della donna.

Per la determinazione del giorno di ovulazione e della fase post-ovulatoria viene utilizzata la temperatura basale rilevata con l'apposito termistore, che garantisce una precisione di valore al centesimo di °C.

Il programma memorizza i dati della donna, calcola i valori medi delle temperature delle diverse fasi del ciclo, compie una serie di elaborazioni biomatematiche e di comparazione tra i dati rilevati

e quelli memorizzati, riconosce e scarta automaticamente singoli dati non attendibili (ad es. per febbre). Il "Sistema Neuronale Intelligente" del software fa sì che LadyComp baby si adatti ai mutamenti ormonali che vi sono con il passare degli anni nel ciclo della donna.

Da questo complesso sistema di calcoli deriva l'**indicazione di fertilità giornaliera** della donna (infertile o potenzialmente fertile) **valida per 24 ore**.

Possibilità di **utilizzo** del dispositivo **dal menarca alla menopausa**.

**Lady-Comp baby**, grazie alla sua grande versatilità, è **adatto a qualsiasi donna / coppia in età fertile che:**

1. ha **difficoltà di concepimento**, causa problemi di **ridotta fertilità, sia maschile che femminile**, perché consente una pianificazione mirata dei rapporti
2. Pur non essendoci proclamate difficoltà di concepimento, ha da qualche mese rapporti liberi e ancora il **desiderio di rimanere incinta è rimasto irrealizzato**
3. Preferisce fare una **vera prevenzione**, usando oggi, un metodo naturale per la contraccezione sicuro, che però non interferisca con la fertilità della donna. Chi utilizza Lady-Comp baby capisce se ha squilibri ormonali del ciclo, che potrebbero rendere difficoltosa la pianificazione di una gravidanza.

## Indicazioni di Lady-Comp baby:

### ♦ fertilità

- ♦ verde = infertile (affidabilità contraccettiva del 99,3%)
- ♦ rosso = potenzialmente fertile
- ♦ giallo = fase di apprendimento, misurazioni mancanti o squilibrio ormonale

- ♦ Rosso lampeggiante= prognosi dell'ovulazione in fase pre-ovulatoria; a ciclo ultimato indicazione dell'avvenuta ovulazione.
- ♦ Rosso con simbolo maschio e/o femmina = per la pianificazione mirata del sesso del nascituro, con funzione attivata.



## Indicazioni di Lady-Comp baby:

- ◇ **prognosi**
  - ◇ di fertilità per i 6 giorni successivi.
  - ◇ della comparsa delle mestruazioni.
- ◇ **Altre indicazioni sul display:**
  - ◇ Dati elaborati negli ultimi 360 giorni
  - ◇ Calendario di ciclo e dati mestruali dei mesi passati
    - ◇ Statistiche del ciclo con grafici dei mesi passati
    - ◇ Indicazione di fertilità dei mesi passati
    - ◇ Prognosi data mestruazione per i successivi 6 mesi
- ◇ **Statistiche del ciclo:**
  - Numero di Cicli con CLI (Insufficienza della fase luteinica)
  - Numero di Cicli con Pianificazione Mirata corretta
  - Media lunghezza dei cicli
  - Aumento medio della temperatura in fase OV
  - Oscillazione dell'ovulazione in giorni
  - Lunghezza media della fase luteale (Post-OV)
  - Numero di Cicli Monofasici
  - Possibilità di inserimento di Note Personali

## Altre funzioni di Lady-Comp baby:

- ◇ Prognosi del sesso del nascituro ON/OFF
- ◇ Immissione del Indice Massa Corporea BMI
- ◇ Impostazione dispositivo °C o °F.
- ◇ Regolazione della Luminosità del Display
- ◇ Regolazione del Volume del dispositivo
- ◇ Scelta di diverse suonerie
- ◇ Lettura dati su PC tramite cavo USB
- ◇ Stampa dati (PDF) con il proprio PC

## Pianificazione di una Gravidanza

- ◇ Immissione dato RS (rapporto sessuale)
- ◇ Prognosi del sesso del nascituro
- ◇ Pianificazione mirata corretta (Possibile Gravidanza) dopo 4-5 giorni
- ◇ Probabile gravidanza dopo 15 giorni
- ◇ Sicura gravidanza dopo 18 giorni dall'avvenuto concepimento.

- Funzionamento con una batteria ricaricabile (del tipo 2xAAA).
- Memoria dati: fissa 20 anni, temporanea 360 giorni
- Dimensioni cm 9 - peso 130 gr.
- Display digitale a colori.
- Utilizzo senza costi aggiuntivi mensili.

**Garanzia: 2 anni**