

Analisi: signora

Centro Assistenza: BABY COMP srl -Italia Baby Comp Srl - Via Vittorio Veneto 79 - 39042 Bressanone (BZ)

Dati di utilizzo

Nome File: _Claudia__170208_100538.ve

Apparecchio tipo: LadyComp-N Basic

No. di serie: 14750357-112

Data inizio analisi: 22.06.16

Data fine analisi: 08.02.17

Valore temperatura: °C



Via Vittorio Veneto 79/b
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel. +39 0472 831010
Fax +39 0472 832472

Distribuzione dati analoghi

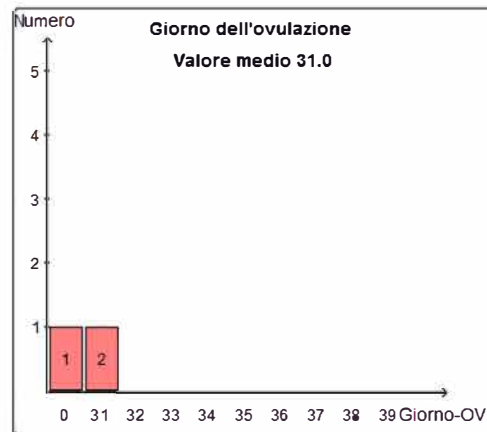
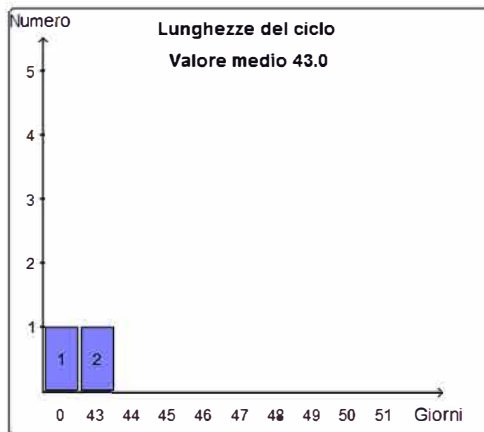


Tabella dei cicli

Ciclo numero C-	Ø	1	2
Misurazioni mancanti in giorni	9.0	8	10
Lunghezza cicli in giorni:	43.0 (67)	43	
Giorno dell'ovulazione	31.0	-	31
Temp. media	36.38	36.40	36.44
Temp. media fase ipotermica	36.38	36.39	36.38
Temp. media fase ipertermica	36.56	36.50	36.61
Diagnosi CLIF/PO (1)		-	-
Pianificazione mirata corretta(2)		-	-
Aumento temp. in fase OV	0.23	--	0.23
Lunghezza fase post-OV(HL)	12.0	--	12

C. è una ragazza di 25 anni che ha interrotto la Pillola 6 mesi fa, dopo 8 anni ininterrotti di assunzione.

In 6 mesi C. ha avuto le mestruazioni 3 volte in tutto.

Di tre cicli inseriti nell'apparecchio:

- il primo, durato 67 giorni, è stato anovulatorio,
- nel secondo, l'ovulazione è probabilmente avvenuta, ma si evidenzia un'insufficienza luteinica
- il terzo ciclo non è ancora concluso

La fertilità si sta probabilmente ripristinando con lentezza e con un importante squilibrio estro-progestinico da affrontare preferibilmente con delle terapie olistiche.

(1) CLI: (Cycle Luteal Insufficiency) Insufficienza fase luteina / PO: Cicli anovulatori

(2) ""+"" = il dato RS (Rapporto Sessuale) e OV (Ovulazione) coincidono

